

Gluceofine® Pro

Gönnen Sie sich das Pro an Sicherheit!

Gluceofine® Pro Sicherheits-Lanzetten




- Sterile Sicherheitslanzette
- Vorbeugung von Nadelstichverletzungen
- Entspricht Direktive EU 2010/32 §4, Art. 7 und TRBA250
- Druckauslösung gewährleistet optimale Distanz zwischen Lanzette und Haut
- Ideal auch für Patienten mit eingeschränktem Sehvermögen oder mit verminderter Feinmotorik
- Ultra-feine Nadel für geringes Schmerzempfinden

Nadellänge	Inhalt	Art.Nr.	PZN
23G	100 Stk	4292014	14006207
28G	100 Stk	4292013	14006213

Nadellänge	Stechtiefe	Blutmenge	Ideal für
23G	2,2 mm	30 - 70 µl	dicke und verhornte Haut
28G	1,5 mm	bis zu 10 µl	dünne Haut und Kinder

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Die Sicherheitskappe gerade abziehen.
2. Die Gluceofine® Pro Lanzette fest gegen die beabsichtigte Einstichstelle drücken und somit das Gerät aktivieren.
3. Sanften Druck in regelmäßigen Abständen in Richtung der Einstichstelle ausüben, um die benötigte Menge an Blut zu erhalten.

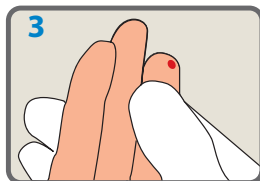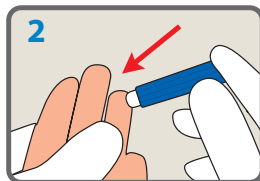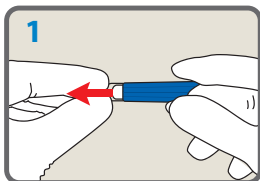

CE 0197