

# Gluceofine<sup>®</sup> Pro

## Gönnen Sie sich das Pro an Sicherheit!

### Gluceofine<sup>®</sup> Pro Pen-Nadeln

- Verschiedene Nadellängen für individuelle Ansprüche
- Großer Innendurchmesser für besseren Insulindurchfluss
- Extra dünne Nadel mit Silikonbeschichtung – für maximalen Komfort
- Besonders feine Nadelspitze für eine angenehme Injektion
- Farbkodierung zur einfachen und sicheren Erkennung der Nadellänge
- Kompatibel mit allen Insulinpens – EN ISO 11608-2:2012

Nadellänge	Inhalt	Art.Nr.	PZN
5mm (31G x 0,25mm)	100 Stk	4264017	14006153
8mm (31G x 0,25mm)	100 Stk	4264018	14006176



### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Schutzfolie entfernen.
2. Nadel auf den Pen aufschrauben.
3. Äußere Schutzkappe entfernen.
4. Durchgängigkeitsprobe durchführen.
5. Nadel VOLLSTÄNDIG in die Haut einstechen, danach Insulinabgabe starten.  
10 Sekunden warten bevor die Nadel aus der Haut entfernt wird.
6. Nadel abschrauben und entsorgen.

   
SINGLE USE **STERILE EO**  
CE 0197

#### Tipp:

Verwenden Sie zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Injektionsstellen, um unnötige Schmerzen und Gewebsveränderungen zu vermeiden.

