


Gluceofine® Pro

Gönnen Sie sich das Pro an Sicherheit!

Gluceofine® Pro Sicherheits-Pen-Nadeln

- Sichere Insulininjektion – keine Gefahr von Nadelstichverletzungen
- Patentierter Verriegelungsmechanismus verhindert Wiederverwendung der benutzten Nadel
- Entspricht Direktive EU 2010/32 §4, Art. 7 und TRBA250
- Verschiedene Nadellängen für individuelle Ansprüche
- Extra dünne Nadel mit Silikonbeschichtung – für maximalen Komfort
- Farbkodierung zur einfachen und sicheren Erkennung der Nadellänge
- Kompatibel mit allen Insulinpens – EN ISO 11608-2:2012

Nadellänge	Inhalt	Art.Nr.	PZN
5mm (30G x 0,30mm)	100 Stk	4296015	14006182
8mm (30G x 0,30mm)	100 Stk	4296016	14006199

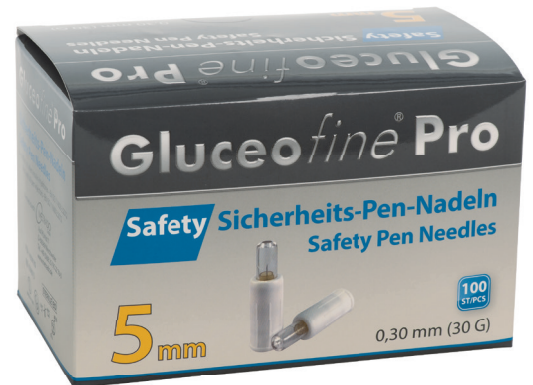

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Schutzfolie entfernen.
2. Nadel auf den Pen aufschrauben.
3. Äußere Schutzkappe entfernen.
4. Durchgängigkeitsprobe durchführen.
5. Insulinpen im 90° Winkel auf die gestraffte Haut aufsetzen (keine Hautfalte!).
6. Nadel VOLLSTÄNDIG in die Haut einstechen, danach Insulinabgabe starten.
10 Sekunden warten bevor die Nadel aus der Haut entfernt wird.
7. Nadel ist blockiert.
8. Nadel abschrauben und entsorgen.

ACHTUNG: Das Sicherheitsseal sorgt dafür, dass die Pennadel steril ist. Verwenden Sie die Pennadel nicht, wenn das Sicherheitsseal bereits fehlt. Von Kindern fernhalten. Entsorgung gemäß den lokalen Bestimmungen.



STERILE EO

CE0197

Tipp:

Verwenden Sie zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Injektionsstellen, um unnötige Schmerzen und Gewebsveränderungen zu vermeiden.

